

## Маточные кольца

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эта инструкция предназначена для следующих изделий Wallace®:

№ по каталогу 700/300/050-110, Маточное кольцо из ПВХ

В этих инструкциях содержится важная информация по безопасному применению продукта. Прежде чем начать пользоваться продуктом, ознакомьтесь с инструкциями по применению, включая предостережения и предупреждения. Ненадлежащее соблюдение предостережений, предупреждений и инструкций может привести к смерти или серьезной травме пациента и(или) врача.

**ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННЫЙ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕН ВСЮДУ, ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОДУКТ**

#### ОПИСАНИЕ

Серия маточных колец, изготовленных из ПВХ, для паллиативного лечения смещения матки.

Гибкое маточное кольцо из ПВХ с большим поперечным сечением.

Маточные кольца Wallace® доступны по предписанию субъекта общественного здравоохранения Соединенного Королевства.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 В соответствии с принятой медицинской техникой определите требуемый размер маточного кольца.
- 2 При необходимости кольцо можно погрузить в горячую воду для нагрева и повышения гибкости.
- 3 Надев стерильные перчатки, изогните средний палец вдоль внешнего края маточного кольца по центру, пока его концы не соприкоснутся.
- 4 Для облегчения введения маточного кольца на его переднюю поверхность можно нанести водорастворимую пластичную смазку на основе вазелина. Удерживая маточное кольцо в вертикальном положении, введите его во влагалище под углом вниз, по направлению к тазовому дну.
- 5 Извлеките пальцы, нащупайте большим пальцем маточное кольцо и протолкните его на место так, чтобы оно лежало на выступающей кости за лонным сочленением.
- 6 Проверьте положение маточного кольца. При ощупывании шейка должна проходить через кольцо. Маточное кольцо должно располагаться поперек влагалища, при этом его задний край должен находиться в нижнем своде, а передний край — за лонным сочленением.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1 Перед введением или заменой маточного кольца рекомендуется провести проверку влагалища с помощью зеркала.
- 2 Маточные кольца Wallace® поставляются нестерильными и предназначены для одноразового использования. Изделия должны быть извлечены и утилизированы через 6 месяцев.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1 Введение и извлечение маточного кольца должен выполнять только подготовленный, обладающий достаточной квалификацией персонал.
- 2 После извлечения маточного кольца необходимо провести осмотр влагалища для проверки на наличие язв, кровотечения, инфекций.

Wallace, марка с дизайном Smiths Medical и марка с дизайном Smiths Medical являются торговыми марками Smiths Medical. Символ ® означает, что торговая марка зарегистрирована в Ведомстве по патентам и торговым маркам США и в некоторых иных странах. Все иные названия и марки, упоминаемые в документе, являются торговыми названиями, торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

© 2014 Smiths Medical. Все права защищены.



**Осторожно!**



Не использовать повторно



Номер по каталогу



Номер партии



Дата изготовления



Использовать до



Изготовитель



Не содержит натуральный каучуковый латекс



Содержание или присутствие фталата: ди-(2-этилгексил)фталат (ДЭГФ)

[www.smiths-medical.com/phthalates](http://www.smiths-medical.com/phthalates)



Количество



Нестерильно



Не использовать, если упаковка повреждена



Боится сырости



Держать вдали от солнечного света

#### Одноразовые.

**Не использовать повторно: Чтобы медицинские изделия соответствовали своему назначению, материал, из которого они изготовлены, должен обладать определенными характеристиками. Верификация этих характеристик произведена только для одноразового использования. Любая попытка повторной обработки изделия для его последующего использования может отрицательно сказаться на целостности изделия или привести к снижению эффекта его действия. Уничтожить после использования.**